



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU

NAVODILO ZA VARNO DELO

NAVODILO ZA VARNO NAMEŠČANJE UPORABO IN ODSTRANJEVANJE KIRURŠKE MASKE tip II R

Šifra dokumenta / izdaja:
NVU-ZbVZD-OVO 010/01

Število strani: 2

www.zbornica-vzd.si



Standard SIST EN 14683:2019 + AC:2019

VARUJE PRED

NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN OKVARE

➤ Širjenjem okužb respiratornih obolenj

➤ Negativni učinki na zdravje zaradi okužb.

UPORABLJA SE

- Za zaščito pred okužbami – kapljični prenos preko ust in nosu na okolico.
- Kirurška maska je namenjena enkratni uporabi, ko jo enkrat odstranimo z obraza ni več uporabna.
- Pri osebah z brado maska ob obrazu ne tesni, zato morajo biti osebe, ki uporabljajo masko dnevno obriti.
- Ne uporablja se kot nadomestek zaščitnih respiratorjev (SIST EN 149) in zaščitnih mask (SIST EN 140, SIST EN 143, SIST EN 14387).

NAMESTITEV

- Pred namestitvijo maske poskrbimo, da so naše roke čiste.
- V delovnem okolju jih temeljito umijemo ali pa razkužimo.
- Ko jemljemo masko iz embalaže se ne dotikamo ničesar drugega.
- Pomembno je, da prepoznamo zgornji del maske, to je tisti, ki ima vstavljeno žičko.
- Žička je namenjena temu, da jo oblikujemo glede na naš nosni koren.
- Zgornji trak privežemo ravno nad ušesi.
- Masko raztegnemo pod brado in jo poravnamo.
- Spodnji trak napeljemo za ušesi in jo zavežemo na vrhu glave.
- Znova se prepričamo, da naša maska tesni. Začnemo na nosnem korenu in nadaljujemo proti zunanjemu delu obraza. Preverimo, če maska tesni ob licih. Masko pod brado poravnamo v kolikor je potrebno.
- Tako nameščeno masko lahko uporabljamo največ dve uri oziroma jo zamenjamo, če le ta postane vlažna zaradi našega dihanja.
- V kolikor uporabljamo korekcijska očala, jih namestimo šele, ko je maska nameščena. S tem preprečimo rošenje.

ODSTRANITEV

- Poskrbimo, da so roke čiste. Roke temeljito umijemo ali razkužimo z razkužilom za roke.
- Začnemo s korekcijskimi očali in nadaljujemo s spodnjim trakom, ki je bil privezan na vrhu glave.
- Nadaljujemo s zgornjim trakom, ki je bil privezan ravno nad ušesi.
- Masko brez nepotrebne prepijanja odvržemo direktno v koš za smeti.
- Ponovno poskrbimo, da so naše roke čiste.

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI NAMESTITVI

- Zaščitno sredstvo je namenjeno **enkratni uporabi**.
- Zaščitnemu sredstvu **ne sme biti zmanjšana zaščitna funkcija**.
- **V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se zaščitnega sredstva ne sme uporabljati** in se mora odstraniti iz uporabe.
- **Uporaba maske na neobrito brado.**

SLIKOVNI PRIKAZ NAMESTITVE IN ODSTRANITVE MASKE

PRAVILNA NAMESTITEV ZAŠČITNE MASKE ZA ENKRATNO UPORABO



Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali pa si jih razkužimo z razkužilom.



Masko obmerno tako, da bo vgrajena kovinska žička na zgornji strani. Pri barvni maski pazimo, da je bela stran obrnjena navznoter.



Ko smo zanke zataknili za ušesa, vgrajeno kovinsko žico pritisnemo ob nos tako, da se maska tesno prilega obrazu.



Masko držimo na nosu, nato pa spodnji del maske potegnemo čez brado.



Masko smo pravilno namestili na obraz.

Maska je namenjena ENKRATNI uporabi. ZAMENJATI jo je potrebno po DVEH URAH oziroma POGOSTEJE, če je VLAŽNA.

Ko je nameščena, mora pokrivati USTA, NOS in BRADO.

PRAVILNA ODSTRANITEV ZAŠČITNE MASKE



Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali pa si jih razkužimo z razkužilom.



Pazimo, da masko primemo samo za ušesne zanke, saj se sicer lahko okužimo.



Masko vstavimo v plastično vrečko, ki jo zavozlamo oz. zapremo z elastiko in jo na varnem mestu hranimo 72 ur.



Vrečko z masko po pretečenih 72 urah, odvržemo v koš z odpadki.



Ponavno si umijemo oziroma razkužimo roke z razkužilom.



Masko smo varno odstranili z obraza.

!!! Dokument je splošne narave, zato upoštevaj predvsem navodila proizvajalca !!!



ZBORNICA VARNOSTI
IN ZDRAVJA PRI DELU

NAVODILO ZA VARNO DELO

NAVODILO ZA VARNO NAMEŠČANJE UPORABO IN ODSTRANJEVANJE KIRURŠKE MASKE tip II R

Šifra dokumenta / izdaja:
NVU-ZbVZD-OVO 010/01

Število strani: 2

www.zbornica-vzd.si